

Tsöliaakia (gluteenenteropaatia) kiirtest koduseks kasutamiseks.
Veretest

KASUTUSJUHEND

GlutenCHECK on usaldusväärne ja lihtne kiirtest enesetestamiseks (immunokromatograafiline) tsöliaakia tuvastamiseks. Tsöliaakiat seostatakse IgA antikehadega, mida tuvastatakse sõrmeotsa verest. Lugege hoolikalt kasutusjuhendit enne testimise läbiviimist hästivalgustatud ruumis.

MIS ON TSÖLIAAKIA?

Tsöliaaka on eluagene, tõsine seedetrakti häire, mis võib põhjustada mitmeid sümptomeid nagu kõhulahtisus, kõhupuhitus, kaalu kaotus või naha kahjustused. See haigus on põhjustatud püsivast gluteeni talumatusest – gluteen on segu proteiinidest, mida leidub nisust, rukkist, odrast ja kaerast. Sümptomeid saab vältida ainult siis, kui pidada gluteenivaba dieeti.

TESTI PÕHIMÕTE

GlutenCHECK on immunokromatograafiline kodune kiirtest, mis tuvastab IgA antikehasid sõrmeotsa verest. Kui vereproovis on nimetatud antikehasid, tekib testkassetile värviline joon kontrolljoone ja testi juurde. Testkassetile integreeritud kontrollsüsteem tagab testi õige kasutamise. Testi jaoks on vaja ainult 1 tilka verd. Testi läbiviimiseks läheb 5 minutit.

PAKENDI SISU

- 1 testkassett ja pipett
- 1 steriilne automaatne lantsett
- 1 klaasist kappillaar
- 1 alkoholipadi
- 1 plaaster
- 1 0.5ml pudel puhverlahust

ETTEVALMISTUS

- Enne verevõtmist, valmistage ette kõik vajalikud testi komponendid:

- automaatne lantsett;
- alkoholipadi;
- klaasist kapillaar.

- Eemaldage pudeli avamiseks puhverlahuselt kork.


- Võtke fooliumpakendist välja testkassett ja pipett.

- Asetage testkassett horisontaalselt kuivale tasapinnale.


- Kui fooliumpakend on avatud, peaksite testi läbiviima 10 minuti jooksul.

TESTI LÄBIVIIMINE


1. Asetage avatud puhverlahuse pudel enda ette.
2. Keerake lantseti värvilist nuppu pildil näidatud suunas (vastupäeva) ning visage hall otsik prügikasti.

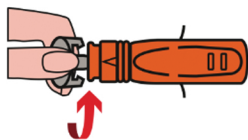

3. Masseerige õrnalt sõrme otsa ja puhastage see alkoholipadjaga.
4. Suruge ümmargune lantseti ots kindlalt vastu eelnevalt puhastatud sõrme ja vajutage lantseti päästikut.

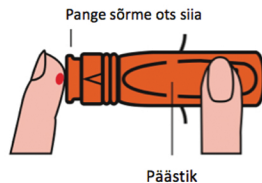


5. Oodake, kuni koguneb 1 tilk sõrmeotsa verd. Siis avage plastikust anum, mille sees on peen klaasist kapillaar. Hoidke ühte kapillaari otsa horisontaalselt veretilga vastas, kuni see on täitunud (veri koguneb sinna automaatselt).

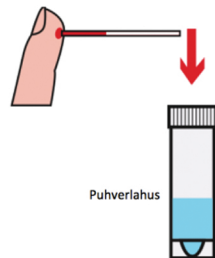

6. Pange täidetud kapillaar puhverlahuse pudelisse ja sulgege pudel korgiga. Raputage pudelit mitu korda, kuni on näha, et veri on puhverlahusega segunenud.



7. Avage puhverlahuse pudel ja võtke sellest pipetiga (asub fooliumi sees) mõni tilk segunenud proovilahust. Hoidke pipetti, vertikaalselt testkasseti ava kohal.

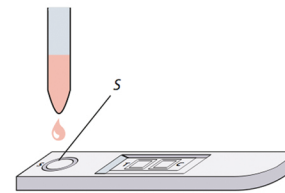

8. Nüüd aga ärge liigutage või katsuge testkasseti 2 minuti jooksul. Testitulemusi võib lugeda ca. 5 minuti pärast. Ärge lugege testitulemusi pärast 10 minuti möödumist.

TULEMUSTE TÕLGENDAMINE

Testi tulemus on **positiivne**, kui punane kontrolljoon ilmub kontrollakna avasse (C) ja hele- või tumepunane testjoon ilmub testakna avasse (T).



Testi tulemus on **negatiivne**, kui punane kontrolljoon ilmub kontrollakna avasse (C), aga testakna avasse (T) testjoont ei teki.



Testi tulemus on **kehtetu**, kui punast kontrolljoont ei teki. Suure tõenäosusega te ei viinud testimist läbi korrektselt või on testkassett kahjustunud. Palun korrake testi uue testkomplektiga.

TULEMUSED

Positiivne tulemus viitab, et teie veres on IgA antikehad, mida seostatakse tsöliaakiaga. Suure tõenäosusega (>97%) on teil tsöliaakia. Te peaksite konsulteerima oma arstiga edasiste uuringute läbiviimiseks ja ravi saamiseks.

Negatiivne tulemus viitab, et teil ei ole tsöliaakiaga seostuvaid IgA antikehasid veres. Tsöliaakia võib visuaalsel hinnangul välistada. Kui teil on endiselt seedetraktiga seotud kaebuseid, konsulteerige oma arstiga edasiste uuringute tegemiseks.

SÄILITAMINE

Säilitage seadet ja kaasasolevaid tarvikuid toatemperatuuril (10-27°C). Testi säilivusaeg on 18 kuud, kui on jälgitud säilitamistingimusi. Säilivustähtaeg on märgitud testkasseti fooliumpakendile ja testi pakendile.

HOIATUSED JA PIIRANGUD

- Kui testi kasutusjuhiseid ei ole korrektselt järgitud, võivad testi tulemused olla valed.
- Ärge alustage gluteenivaba dieeti arstiga konsulteerimata.
- Ärge korduvkasutage testi ja tema lisatarvikuid.
- Ärge kasutage testi pärast säilivustähtaaja möödumist.
- Ärge kasutage testi, kui fooliumpakend on kahjustunud. Ärge kasutage katkiseid testi komponente.
- Viige test läbi 10 minuti jooksul pärast testi fooliumpakendi avamist.
- Puhverlahus sisaldab 0.09% naatriumasiidi. Vältige kontakti nahaga. Ärge neelake!
- Esinemissagedus (100 000 inimese kohta), kus tsöliaaka patsiendil puuduvad IgA antikehad, on 2-3%. Sellistel juhtudel ei ole võimalik tsöliaakiat GlutenCHECK-iga tuvastada.
- **GlutenCHECK ei asenda meditsiinilist diagnoosi. Tsöliaakia tuvastamise puhul konsulteerige ALATI arstiga.**

MAALETOOJA

Medivar OÜ. Pärnu mnt 139e-2, 11317 Tallinn



NanoRepro AG
Untergasse 8
D-35037 Marburg



 Lugege kasutusjuhendit	 In-vitro diagnostiliseks kasutamiseks (ainult välispidiseks kasutamiseks)	 Vaadake märget pakendil Mitte korduvkasutada
 Säilitage kuivas (10-27°C), ÄRGA KÜLMUTAGE!	 Teste pakendis	 Vaadake märget pakendil